



Программное обеспечение

# **3D СКАНЕР НЕВРОКОР**

## **Инструкция по установке**

Рег. номер 2017618009

ООО Неврокор

Москва 2022

# 1 Установка и удаление программы

Перед установкой программы проверьте, что параметры вашего компьютера удовлетворяют минимальным системным требованиям, необходимым для нормальной работы программы «3D Сканер»:

- ✓ Операционная система: Windows 10 x64
- ✓ Процессор: Intel 2 ГГц
- ✓ Оперативная память: 4 Гб
- ✓ Видеоадаптер: 4 Гб с поддержкой DirectX 9 и OpenGL 4.0
- ✓ Два порта USB 3.0 с контроллером Intel
- ✓ Свободное место на жестком диске: 400 Мб

Для установки или обновления версии программы запустите установочный файл и следуйте инструкциям инсталлятора. В диалоге выбора языка установки (см. Рис. 1.1) нажмите кнопку «ОК».

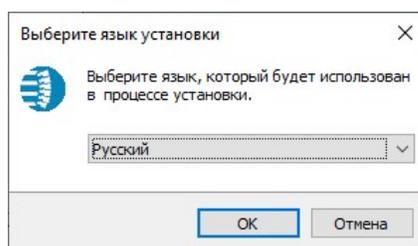


Рис. 1.1. Окно выбора языка инсталлятора программы

В диалоге выбора директории программы (см. Рис. 1.2) измените при необходимости директорию установки кнопкой «Обзор...» и нажмите кнопку «Далее >». В следующем диалоге (см. Рис. 1.3) при необходимости измените папку программы в меню «Пуск» и нажмите кнопку «Далее».

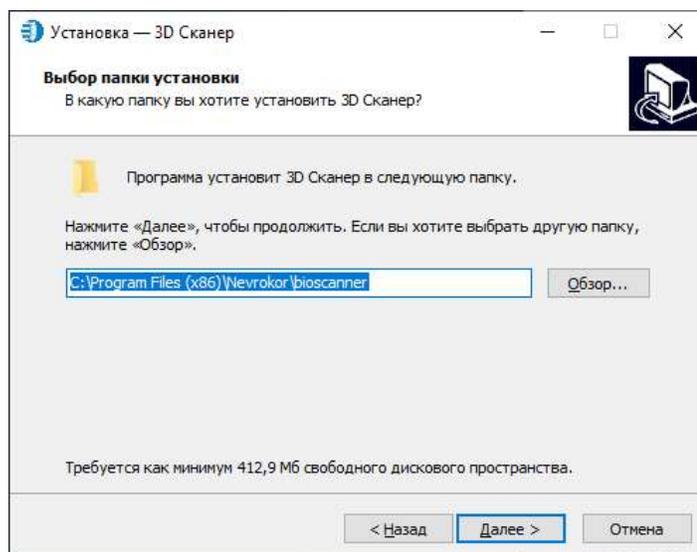


Рис. 1.2. Выбор директории установки программы

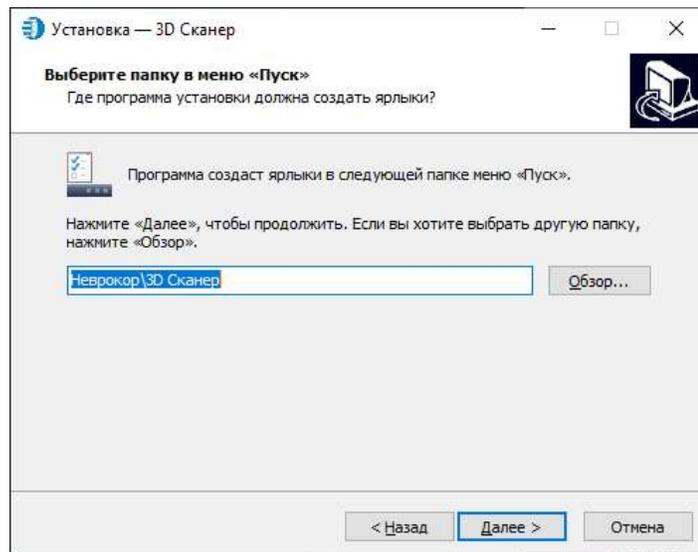


Рис. 1.3. Окно выбора папки программы в меню «Пуск»

В окне выбора дополнительных значков программы (см. Рис. 1.4) отметьте значки программы и нажмите «**Далее >**».

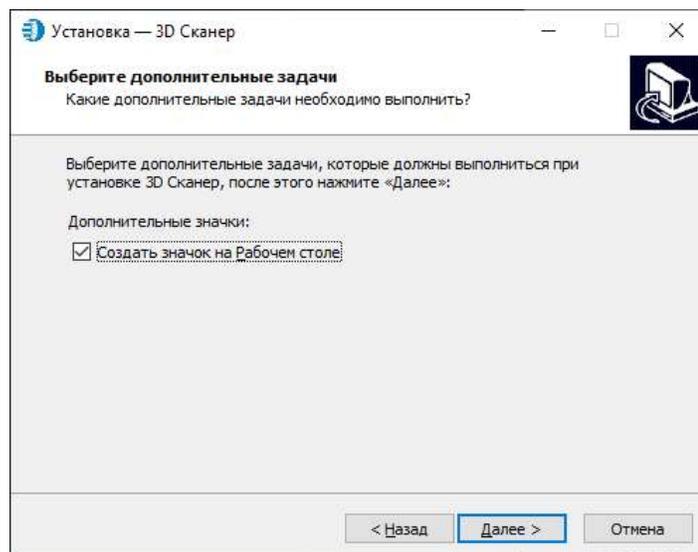


Рис. 1.4. Окно выбора дополнительных значков программы

В окне начала установки (см. Рис. 1.5) проверьте параметры установки и нажмите «**Установить**» для начала установки.

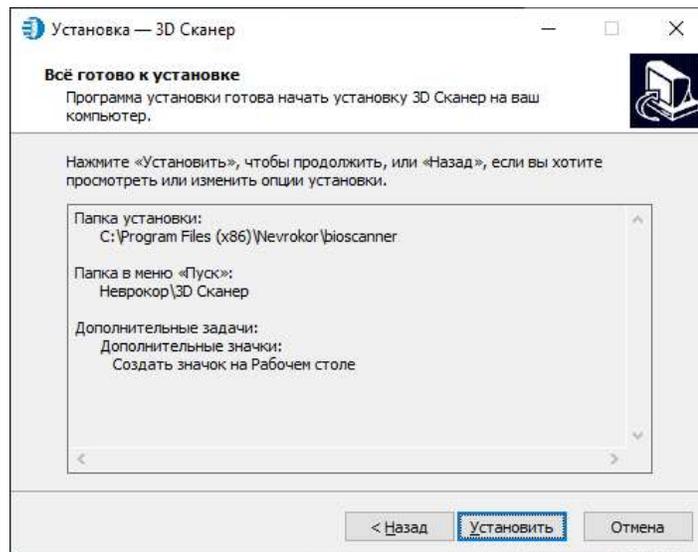



Рис. 1.5. Окно начала установки программы

После установки основной программы появится окно установки Kinect for Windows Runtime. В окне установки нужно нажать кнопку «**Install**» и дождаться завершения установки, после чего нажать кнопку «**Close**».



Рис. 1.6. Окно установки Kinect for Windows Runtime

В случае успешной установки появится окно завершения установки программы (см. Рис. 1.7). Нажмите «**Завершить**» для выхода из программы установки.

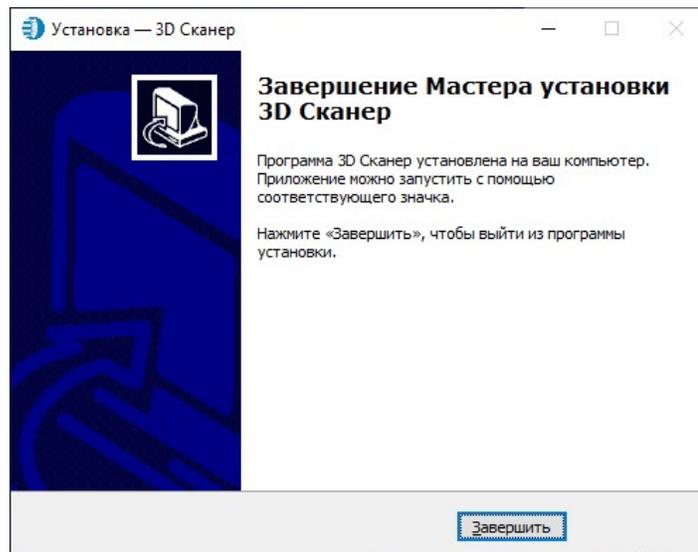

*Рис. 1.7. Окно завершения установки программы*

Удаление программы с компьютера производится через панель управления Windows в разделе «**Программы и компоненты**». В списке найдите программу 3D Сканер и в контекстном меню выберите пункт «**Удалить**».

Контакты для связи

<http://www.neurocor.ru/>

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 1, офис 34 +7 (495) 740-35-34

Ведущий программист ООО «Неврокор» Тимохин Дмитрий

timohin@neurocor.ru